

BONO DE DESCUENTO **20%**

AEROSPACER
INDUSTRIA ARGENTINA



- CON VISOR DE VALVULA
- ANTIESTATICA
- LIBRE DE LATEX Y FTALATOS
- AEROCAMARA BIVALVULAR



INFANTIL



ADULTO



CON BOQUILLA



ESTUCHE



LACTANTE



JUVENIL



TRAQUEO

MODELO

- LACTANTE
- INFANTIL
- JUVENIL
- ADULTO
- CON BOQUILLA
- TRAQUEOTOMÍA
- ESTUCHE

Fecha: / /

firma de médico

Consultanos al:

+54911 - 3940 5315

Tel: 011 4919 2200

Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 Hs.

info@patejim.com.ar

AerocamarasAerospacer

@aerocamaras.aerospacer

www.aerocamaras.com.ar

INSTRUCCIONES

AEROSPACER
INDUSTRIA ARGENTINA

Paciente: -----

MDI/Aerosol: -----

1. Retire la tapa del aerosol y agitar 10 segundos. (El aerosol debe ser agitado antes de cada disparo).
2. Insertar el aerosol en la parte posterior de la aerocámara.
3. Sellar la máscara a la cara cubriendo nariz y boca (en el caso de aerocámara con pieza bucal colocar la boquilla en la boca sellando con los labios)
4. Presionar el aerosol manteniendo la cara sellada con la máscara, respirar normalmente durante 10 inhalaciones. (El visor de válvula permite ver el movimiento de la válvula principal. La válvula se mueve solo si la máscara esta correctamente sellada. Por el visor se vera el movimiento de la válvula flor abriéndose hacia el paciente en cada inhalación, dejando pasar el aerosol a la vía aérea y permitiendo contar las inhalaciones.) En el caso de Aerocámara con pieza bucal: vaciar el aire de la vía aérea, oprimir el aerosol y realizar una inhalación profunda, completa y lenta, contener la respiración 10 segundos. (Si al paciente se le dificulta realizar una inhalación profunda y contener la respiración, la forma de aplicación es: vaciar el aire de la vía aérea ,oprimir el aerosol y realizar dos o tres inhalaciones lentas dentro de la Aerocámara).
5. Repetir los _____ veces. (Importante siga las instrucciones que acompañan al aerosol respecto al tiempo que debe esperar antes de repetir).
6. Retirar el aerosol de la aerocámara. Tapar y guardar.

Observaciones: -----



No saque la válvula flor. No es un tapón, es la válvula que permite la llegada del aerosol a la vía aérea. No hervir. No desinfectar. No guardar en la heladera. Lavar según instrucciones, con agua y detergente y No enjuagar.

Llevar siempre la aerocámara a la consulta médica. Es importante que el médico la chequee.

Guardarla en estuche cerrado (preferente- mente de tela) a temperatura ambiente.

info@patejim.com.ar AerocamarasAerospacer @aerocamaras.aerospacer www.aerocamaras.com.ar

El descuento no es acumulativo con ningún otro tipo de promoción UNICAMENTE VALIDO PARA LA REPUBLICA ARGENTINA. (consultá farmacias adheridas)

FARMACIA

PACIENTE

